

## Wiederverwendbare Mund- und Nasenmaske

mit fünf zweilagigen Wechselfiltern

von Pflegefachkräften entwickelt, ausgiebig erprobt & empfohlen

- hochwertiger Stoff (100% Baumwolle / Öko-Tex Standard 100)
- fünf zweilagige Wechselfilter für mehr Sicherheit
- gute Abdeckung des Gesichts
- leichte Anpassung an die Gesichtsform
- brillentauglich, feuchtigkeitsregulierend
- für die Desinfektion in der Mikrowelle geeignet
- Ohrgummibänder angenehm zu tragen
- hoher Tragekomfort durch geringen Atemwiderstand

PPS Med. Versandhandel GmbH  
Glückauf-Ring 19  
45699 Herten

Kostenlose Bestell-Hotline  
Tel.: 0800 / 777 6 333  
Fax: 0800 / 777 6 334

[www.pps-med.de](http://www.pps-med.de)



## Sechs Schritte bis zur ersten Nutzung

Vor der ersten Benutzung bitte Maske waschen.

1. Hände gründlich waschen (siehe Pflegehinweise).
2. Mund- und Nasenmaske auf links drehen. Den Nasenbügel bis zur Begrenzung in die dafür vorgesehene Tunnelöffnung einführen.
3. Mund- und Nasenmaske auf rechts drehen. Filter zuschneiden und in die Maske einlegen. Bei Bedarf kann der Filter auch gefaltet und somit zweilagig verwendet werden. Hierbei den Filter mit der geschlossenen Seite zuerst in die Maske einfügen.
4. Mund- und Nasenmaske mit Gummibändern hinter den Ohren befestigen.
5. Unteren Teil der Mund- und Nasenmaske über das Kinn ziehen.
6. Nasenbügel durch Ausstreichen an die Nasenform anpassen.

**So sind Mund und Nase optimal bedeckt.**

# Pflegehinweise

## Wiederverwendbare Mund- und Nasenmaske



### Händewaschen

Vor Gebrauch/Anlegen der Maske die Hände ca. 30 Sekunden gründlich mit Seife waschen.



### Waschmaschine

Vor der ersten Benutzung bitte Maske waschen.

Nasenbügel und Filter müssen vorab entfernt werden. Eine Reinigung bei 60° C, unter Verwendung eines Wäschebeutels, wird empfohlen.

Die erforderlichen Temperaturen für eine optimale Reinigung werden in Eco- oder Sparprogrammen meist nicht erreicht. Es wird daher davon abgeraten.

Zum Trocknen die Mund- und Nasenmaske am Gummiband aufhängen.



### Auskochen im Kochtopf (umweltschonender)

Nasenbügel und Filter müssen vorab entfernt werden. Ausreichend Wasser zum Kochen bringen. Mund- und Nasenmaske hinzufügen und für ca. acht Minuten auskochen.

Zum Trocknen die Mund- und Nasenmaske am Gummiband aufhängen.



### Schnelle Desinfektion durch Bügeln

Längeres Dampfbügeln bei ca. 200° C ist eine schnelle Alternative zur hygienischen Aufbereitung. Ersetzt keine Reinigung!

---

Maske beim Anlegen möglichst nur an den Gummibändern berühren. Mund- und Nasenmaske bei Nichtbenutzung in einer verschließbaren Tüte/Tasche aufbewahren. Maske hat keine medizinische Zertifizierung und bietet keinen Virenschutz. Der Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.

---

PPS Med. Versandhandel GmbH  
Glückauf-Ring 19  
45699 Herten

Kostenlose Bestell-Hotline  
Tel.: 0800 / 777 6 333  
Fax: 0800 / 777 6 334